

リフト アンド バス リクシー



上質で豊かな時間。
コンパクト浴槽のその先へ。



広々とした浴槽内でゆったり入浴。

浴槽自体はコンパクトでも、浴槽内は広々。
浴槽幅は1115×幅は920mmあり、大柄な方でもゆったり入浴
できます。



より近くで安全に。

ストレッチャーの脚部が浴槽下部に届るので、介助する方
は入浴する方の両脇まで近づけることができます。浴槽の縁
高は80cm、腰をかがめずに楽な姿勢で介助できます。



- 評価測定
- 運転療法
- 沐浴療法
- 物理療法
- 薬品
- ACV、作業療法
- 評価療法
- 自立支援療法
- 認知・対応
- 入浴療法

- 移動性入浴
- 療養入浴
- ACV入浴
- 予防的入浴
- 入浴療法
- 入浴療法

- 評価測定
- 運転療法
- 沐浴療法
- 物理療法
- 薬品
- ACV、作業療法
- 評価療法
- 自立支援療法
- 認知・対応
- 入浴療法

- 移動性入浴
- 療養入浴
- ACV入浴
- 予防的入浴
- 入浴療法
- 入浴療法

マイクロバブルでしっかりきれい。


お肌のすみずみまで深くマイクロバブルが、入浴するだけでソ
フワや毛穴の老廃物をやさしく浮かせ上げるほか、泡になる
二オキシ炭素が潤います。



※マイクロバブルの直径は、1マイクロバブルが約100μm、通常の水は約1000μmです。
※マイクロバブルの発生は、100W以内の電力で発生します。
※マイクロバブルの発生は、100W以内の電力で発生します。

入浴後も温かさが持続。

通常のお湯とリクシーマイクロバブルで入浴した後の体表温度を
測定。水と空気でできた超微細気泡。マイクロバブルが肌の
すみずみまで届くから、身体が温かさを保ちます。入浴後も温か
さが持続し、温湯効果の長い持続です。

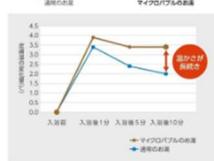

左右独立式で安心安全な入浴。

左右独立のため、高齢化での入浴時などは片側を高く上げて
使用することも可能です。



入浴時の姿勢保持も。

入浴中は前足指を固定し、安定した入浴姿勢が保てる設計に
なっています。



シンプルなお操作のリモコン。

リモコンは操作は上押・下押の2つのボタンだけのシンプル設計。
また、ストレッチャーの上昇・下降はリモコンと本体操作部のどち
らでも行えます。



初めて使う方もわかりやすい表示パネル。

ストレッチャーの脚部が浴槽下部に届るので、介助する方
は入浴する方の両脇まで近づけることができます。浴槽の縁
高は80cm、腰をかがめずに楽な姿勢で介助できます。



持ちやすい移動用グリップ。

移動用のグリップは、しっかりとつかめる形状となっています。
移動用のグリップをつかんで移動することも可能です。



充電が簡単な着脱式バッテリー。

バッテリーはストレッチャー上部に設置。腰をかがめずにバッテ
リーの充電や残量の確認ができます。



細かい部分も介助しやすい設計。

4輪—クルック機構
全てのキックスターを折りたたみ、同時に
ロック。個別にロックする手前が折りた
まします。



温度管理システム。

火傷を未然に防ぐため、水温調節が適切になると水温は自動
停止。同時に、水温調節の誤りによってアラートを出します。
※UR-130-UR-120A/UR-120-UR-110-UR-100A/UR-1000B。



双輪キックスター。

大きめの双輪キックスターは、後部
の方向転換もスムーズ。小回りも
きき、狭い場所での移動もスレスレ
フリーです。



高浴時下降止機能。

ストレッチャー側で高浴を検知した際は、浴槽の下降が停止し、
高浴ランプが点滅して危険を知らせます。




- 評価測定
- 運転療法
- 沐浴療法
- 物理療法
- 薬品
- ACV、作業療法
- 評価療法
- 自立支援療法
- 認知・対応
- 入浴療法

- 移動性入浴
- 療養入浴
- ACV入浴
- 予防的入浴
- 入浴療法
- 入浴療法


- 評価測定
- 運転療法
- 沐浴療法
- 物理療法
- 薬品
- ACV、作業療法
- 評価療法
- 自立支援療法
- 認知・対応
- 入浴療法

- 移動性入浴
- 療養入浴
- ACV入浴
- 予防的入浴
- 入浴療法
- 入浴療法

貯湯式より少ない湯量でOK。
光熱費の削減にも。
1名が5分程度入浴した場合の使用湯量は、当社従来タイプの貯湯式浴槽と比較すると85%の削減に。少ない湯量でしっかり身体を洗えるのも、アラエルの大きな特徴です。

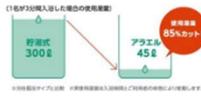

ケアがしやすい介助口と転倒防止。
スリットはカーテンを装着した介助口。水はねを気にせず入浴クアを入れます。また、広々とした転倒防止ドームの中の椅子がしっかり固定できるので、介助時の受け手が楽です。

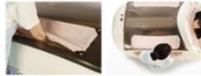

左右、正面、どこからでも出入りできる。
扉口に開閉機構がついていないため、シャワードームへの出入りもフレキシブル。



質量約15kgの軽量設計。
安定感にも優れた入浴用車椅子。
フルトランクルーフ構造でサポートするため、簡単に操作できます。



ボタン一つでしっかり洗えて、負担は軽減。
「おなかを洗おう」「お尻を洗おう」で完了できる「おなかモード」を装備。シャワー式なので湯を貯める必要もありません。



シャワードームと入浴用車椅子の連携もらくらく。
アラエルをいも衛生面に保つため、清掃作業用の「掃除・洗浄モード」を装備。シャワードームと入浴用車椅子の「掃除・洗浄モード」で行えます。



ドームの中は広々空間。
足元と手元が安定した姿勢に。足元は、大柄の方でも快適に入浴いただけます。

温度管理機能。
湯温が設定温度±3℃の範囲内と30℃〜45℃の範囲内になるとシャワーがストップし、身体が冷たくなるのを防いでくれます。



専用ノズルメッシュで除菌・殺菌がしっかり洗える。
座面が浮き上がって、濡れたままでも乾燥が早い状態になっています。



型式	価格	本体価格(税別)	本体価格(税別)
ARA-100	¥1,950,000	¥1,400,000	¥5,500,000




型式	価格	本体価格(税別)	本体価格(税別)
ARA-100C	¥3,200,000	¥2,400,000	¥7,110,000



品名	価格
シャワー入浴専用洗剤 ボディシャンプー-S 4L SP220304A	¥3,400
SP220307	¥13,600



品名	価格
ドーム専用除菌洗浄剤 ネオアルベストAC	¥8,000

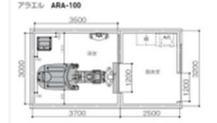

AR(拡張現実)で実際の空間に「アラエル」を設置したイメージを確認できます。

シャワーボッド アラエル

アラエルだから、洗える。
入浴介助をアップデート。

WEBはこちら
QRコード

絶妙な位置に配置されたシャワーノズルで、全身くまなく洗える。

ウルトラファインパルでしっかり洗える。

シャワー浴なのに身体の内まで温かい。